




ORTH ORIGINAL

# Extracteur de tige fémorale

Facilite l'extraction de la tige fémorale  
après retrait de la tête

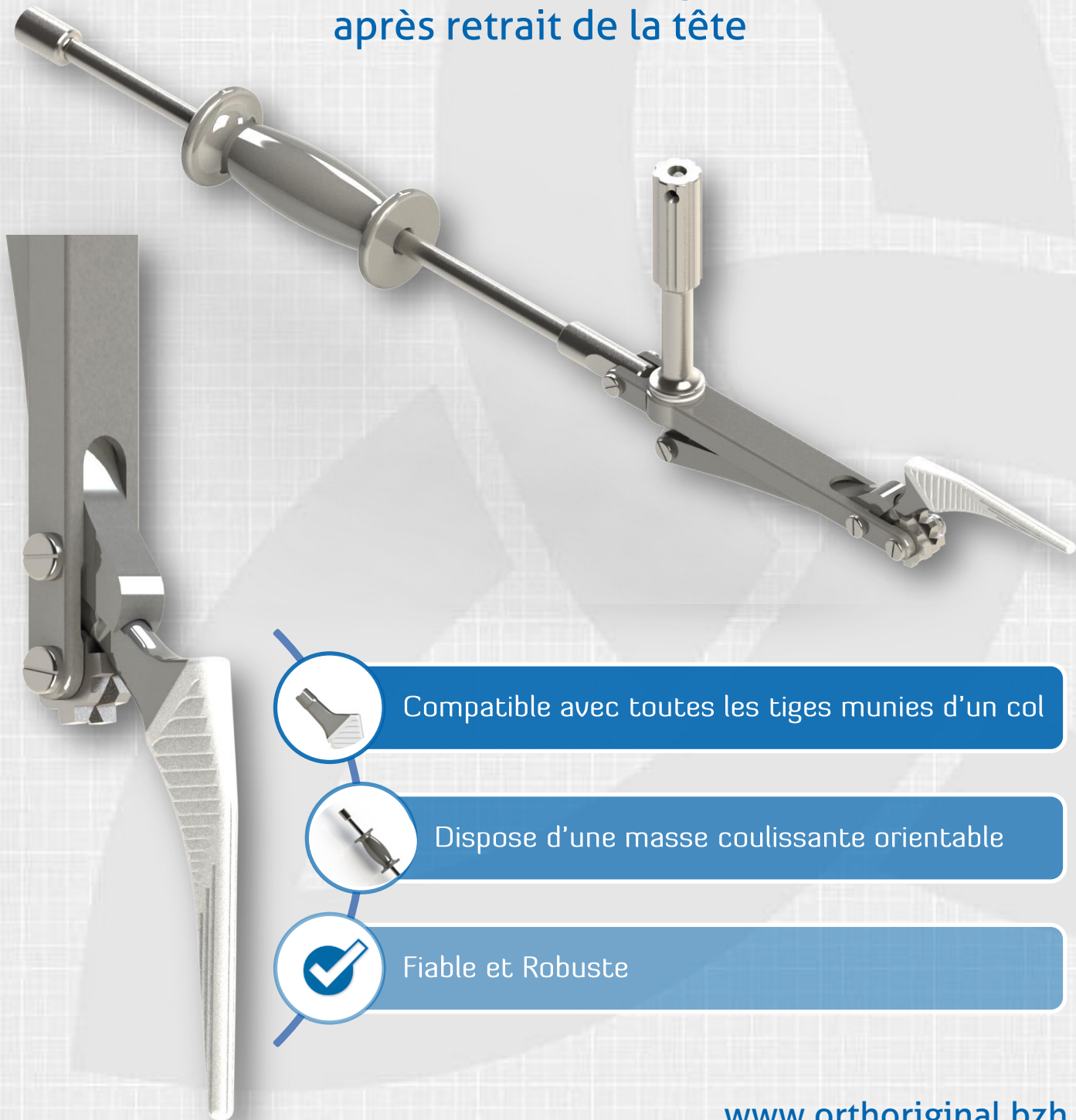

Compatible avec toutes les tiges munies d'un col



Dispose d'une masse coulissante orientable



Fiable et Robuste



1. L'extracteur s'adapte à tous les modèles de tiges à tête modulaire.



2. Le cône est pris en étau entre les mâchoires de l'instrument. Il suffit de serrer la poignée à la main pour sécuriser la tige.



3. La tige d'extraction est vissée dans la chape, orientable dans la direction voulue.



4. L'extraction est réalisée rapidement et avec peu d'effort en utilisant la masse coulissante.



Tél. : +33 (0)2.23.35.53.40

[contact@orthoriginal.bzh](mailto:contact@orthoriginal.bzh)

Fax : +33 (0)2.23.35.16.35

[www.orthoriginal.bzh](http://www.orthoriginal.bzh)



Orthoriginal, 44C Rue de Bray  
35510 Cesson-Sévigné, France

Désignation	Référence
Ensemble Extracteur universel de tige fémorale	0081-01-00