

Extracteur de tige fémorale

Pour l'extraction des tiges fémorales à têtes modulaires



- Ne pas apporter de modifications à l'instrument.
- Ne pas chercher à démonter l'instrument.
- En cas d'endommagement, contacter le fabricant.
- Vérifier le bon état du dispositif avant chaque usage.
- Vérifier que l'instrument est correctement assemblé avant utilisation.

Signification des termes et symboles :



Numéro de lot



Consulter la notice d'utilisation



Référence produit



Dispositif fourni non stérile

Informations sur le fabricant :

ASKORN MEDICAL

44C rue de Bray

35510 Cesson-Sévigné, FRANCE

Tél : +33 (0)2 23 35 53 35


Fax : +33 (0)2 23 35 16 35

☞ Instrument réutilisable

Date de dernière révision :

Novembre 2017

1

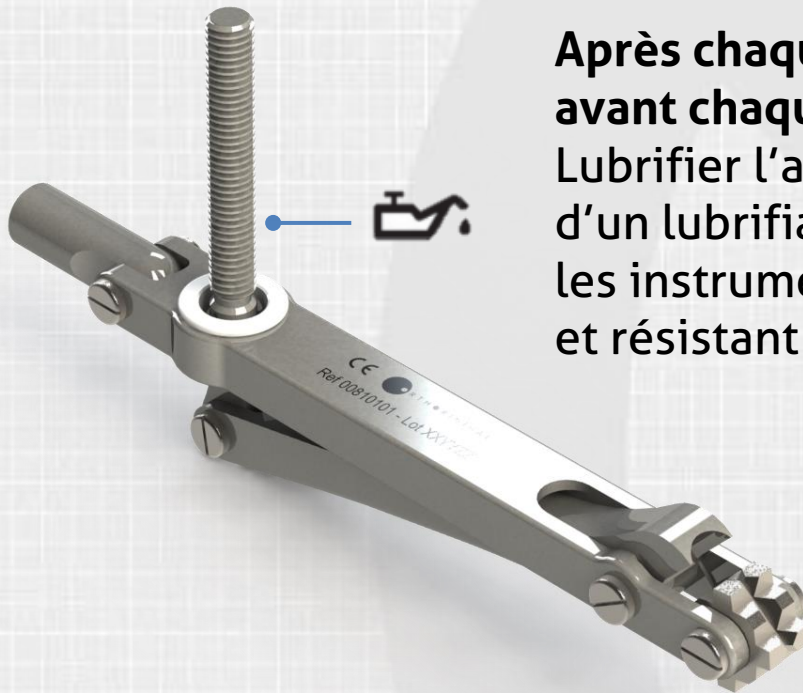

Après chaque nettoyage et avant chaque stérilisation :
Lubrifier l'axe fileté à l'aide d'un lubrifiant conçu pour les instruments chirurgicaux et résistant à l'autoclave.

2



Vérifier que la bague en plastique blanc est mise en place dans le bon sens. Visser la poignée cannelée sur l'axe fileté.

3



Venir placer le cône de la tige à extraire entre les mâchoires de l'instrument.
Serrer en tournant fermement à la main la poignée dans le sens horaire.
Ne pas s'aider d'instruments pour serrer la poignée.

4

Insérer la tige d'extraction dans la masse coulissante, avant de visser fermement la tige dans l'extracteur.
Procéder à l'extraction selon la direction désirée, à l'aide de la masse coulissante.

