

KNEE FIX – Notice d'Utilisation

1. Positionner la butée non stérile au niveau de l'extrémité distale de la jambe et la fixer à la table d'opération en utilisant l'étau (Fig.1).
2. Placer la crémaillère stérile sur le champ opératoire et la mettre en appui contre la butée préalablement positionnée (Fig. 2).
3. **Solidariser la jambe et le pied du patient à la « chaussure » métallique, préalablement stérilisée, par l'intermédiaire d'un bandage (Fig. 3), vérifier que le talon et le mollet soient bien solidaires de la botte.**
4. Positionner la jambe selon le degré de flexion désiré (Fig. 4).
5. Stérilisation : les éléments suivants : crémaillère et « chaussure métallique » sont livrés non stériles et doivent donc être stérilisés avant utilisation : passage en autoclave 135° 7 minutes maximum.
6. Nettoyage et désinfection : tous les éléments doivent être nettoyés rapidement après utilisation



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

N.B. :

Vis permettant de régler l'angle de rotation du pied

